

# NÁVOD NA POUŽITÍ: ZP OPERAČNÍ ČEPICE – JEDNORÁZOVÁ

**Účel použití:** Operační čepice z netkané textilie jsou určeny k jednorázovému použití jako pokrývka hlavy zdravotnického personálu na operačních sálech.

## **Popis:**

Používají se při operačních zákrocích jako preventivní prostředek ochrany operačního pole před kontaminací uvolněnými částicemi pokožky či vlasů zdravotnického personálu.

**Třída ZP:** I nesterilní

## **Prohlášení o shodě:**

Kopii prohlášení o shodě je možné získat na stránkách [www.medicafilter.cz](http://www.medicafilter.cz) v sekci „Ke stažení“, případně na e-mailu: [info@medicafilter.cz](mailto:info@medicafilter.cz)

## **Otevírání:**

Otevřete horní víko krabice, nebo vytrhněte otvor v perforaci, pokud je jím krabička vybavena.

## **Manipulace:**

- 1) Čepici vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená.
  - 2) Nasadte čepici na hlavu tak, aby zakryla celou hlavu a vlasy a zároveň neomezovala ve výhledu.
- Pozor:** za výběr odpovídajícího typu čepice je odpovědný uživatel. Při výběru a použití nevhodné čepice může vzniknout riziko nedostatečné ochrany pacienta před padajícími vlasy a částicemi kůže.
- 3) Pokud čepice během operace zvlhne nebo dojde k jejímu porušení, je nutné ji vyměnit za novou.
  - 4) Po použití zlikvidujte v souladu s vašimi interními předpisy nakládání s odpady skupiny 18 01 04 (Odpady, na jejichž sběr a shromažďování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce).

## **Expirace:**

Životnost tohoto zdravotnického prostředku je stanovena na 5 let od data výroby, při odpovídajícím skladování.

## **Skladování:**

Skladujte při teplotě 5°C - 30°C a při vlhkosti 20 % - 80 % v uzavřeném balení.

## **Upozornění:**

Nepoužívejte operační čepici pokud:

- je po vyjmutí z obalu poškozená (díry v materiálu, utržená gumička, aj.). Je nutné ji vyhodit a použít jinou, neporušenou.
- má prošlou expiraci.
- je před prvním otevřením porušen obal.
- pokud trpíte alergií na latex – týká se čepic BARETT a VARIO.

Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než je stanoven – viz „Popis“ výše.

Nepoužívejte výrobek opakovaně, hrozí nebezpečí kontaminace operačního pole.

Výrobek není určen k používání jako osobní ochranný prostředek.

Na výrobu čepic je použit tenký prodyšný materiál, který nemůže být příliš mechanicky namáhán. Při hrubé manipulaci může dojít k roztržení čepice.

Datum vydání: 06.10.2021

Číslo dokumentu: 2021021



Výrobce: MEDICA FILTER spol. s r.o.

Smetanova 421, 341 92 Kašperské Hory, Czech Republic  
www.medicafilter.cz

