

NÁVOD NA POUŽITÍ: OPERAČNÍ ČEPICE – JEDNORÁZOVÁ

Účel použití: Operační čepice z netkané textilie jsou určeny k jednorázovému použití jako pokrývka hlavy zdravotnického personálu na operačních sálech.

Popis:

Používají se při operačních zákrocích jako preventivní prostředek ochrany operačního pole před kontaminací uvolněnými částicemi pokožky či vlasy zdravotnického personálu.

Otevírání:

Otevřete horní víko krabice, nebo vytrhněte otvor v perforaci, pokud je jím krabička vybavena.

Manipulace:

1) Čepici vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená.

2) Nasadte čepici na hlavu tak, aby zakryla celou hlavu a vlasy a zároveň neomezovala ve výhledu.

Pozor: za výběr odpovídajícího typu čepice je odpovědný uživatel. Při výběru a použití nevhodné čepice může vzniknout riziko nedostatečné ochrany pacienta před padajícími vlasy a částicemi kůže.

3) Pokud čepice během operace zvlhne nebo dojde k jejímu porušení, je nutné ji vyměnit za novou.

4) Po použití zlikvidujte v souladu s vašimi interními předpisy nakládání s odpady skupiny 18 01 04 (Odpady, na jejichž sběr a shromažďování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce).

Expirace:

Životnost tohoto zdravotnického prostředku je stanovena na 5 let od data výroby, při odpovídajícím skladování.

Skladování:

Skladujte při teplotě 5°C - 30°C a při vlhkosti 20 % - 80 % v uzavřeném balení.

Upozornění:

Nepoužívejte operační čepici pokud:

- je po vyjmutí z obalu poškozená (díry v materiálu, utržená gumička, aj.). Je nutné ji vyhodit a použít jinou, neporušenou.
- má prošlou expiraci.
- je před prvním otevřením porušen obal.
- pokud trpíte alergií na latex – týká se čepic typu AFRO, BARETT, FLIP, UNI a VARIO.

Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než je stanoven – viz „Popis“ výše.

Nepoužívejte výrobek opakovaně, hrozí nebezpečí kontaminace operačního pole.

Výrobek není určen k používání jako osobní ochranný prostředek.

Na výrobu čepic je použit tenký prodyšný materiál, který nemůže být příliš mechanicky namáhán. Při hrubé manipulaci může dojít k roztržení čepice.

Datum: 19.04.2021

Číslo dokumentu: 3330421

MEDICA FILTER spol. s r.o.

Smetanova 421, 341 92 Kašperské Hory, Czech Republic
www.medicafilter.cz

